

# Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital



## Wünschen Sie sich ein Baby?

Wenn Sie darüber nachdenken jetzt oder in absehbarer Zukunft ein Kind zu bekommen, können Sie Ihre Chancen maximieren, indem Sie den Eisprung präzise bestimmen. Der Clearblue Ovulationstest Fortschrittlich & Digital ist der einzige Test, der vier oder mehr fruchtbare Tage pro Zyklus\* ermitteln kann, nämlich die Tage vor dem Eisprung und den Eisprungtag selbst. Bei diesem Test werden zwei wichtige Fruchtbarkeitshormone gemessen im Gegensatz zu nur einem wie bei vielen anderen Ovulationstests. Sie können nur an wenigen Tagen in jedem Zyklus schwanger werden und jede Frau ist einzigartig, so dass der Unterschied darin bestehen kann, Ihre besten Tage für eine Empfängnis im Voraus zu kennen.

## Vorteile vom Ovulationstest Fortschrittlich & Digital

- Der einzige Test, der die zwei wesentlichen Fruchtbarkeitshormone zuverlässig misst
- Kann vier oder mehr fruchtbare Tage identifizieren für mehr Möglichkeiten schwanger zu werden. In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt.\*
- Über 99% zuverlässig im Aufspüren des LH-Anstiegs vor dem Eisprung

\*In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt. Gemessen an tatsächlichen Zykluslängen (2012).

## Entdecken Sie die Vorteile

**Über 99 % zuverlässig in der Erkennung des LH-Anstiegs**




Das Aufspüren des plötzlichen Anstiegs des luteinisierenden Hormons 24-36 Stunden vor dem Eisprung ist die zuverlässigste Methode für die Anwendung zu Hause, um Ihre fruchtbarsten Tage zu bestimmen – sie ist nachgewiesen

**Kann vier oder mehr fruchtbare Tage identifizieren\***



Dies ist der einzige Ovulationstest, der vier und mehr Tage hoher und maximaler Fruchtbarkeit identifizieren kann (die exakte Anzahl ist individuell verschieden). Dies bedeutet, dass Sie ihre fruchtbarsten Tage im Voraus kennen, so

**Misst die zwei wesentlichen Fruchtbarkeitshormone**

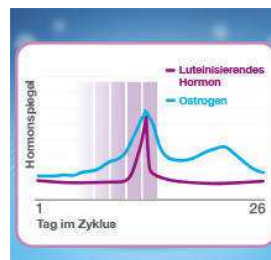

Es ist der einzige Ovulationstest, der Östrogen und das luteinisierende Hormon (LH) misst. Der Östrogenspiegel steigt in den wenigen Tagen vor dem Eisprung an, dann wenn Ihr Körper sich auf die Empfängnis

**Leicht ablesbare digitale Ergebnisse**



Ein „blinkender Smiley“ bedeutet, dass Sie am heutigen Tag eine hohe Chance auf eine Empfängnis haben und dass Ihre zwei fruchtbarsten Tage kurz bevorstehen. Ein „statischer Smiley“ bestätigt, dass Sie die maximale

zwei Mal zuverlässiger als traditionelle Kalendermethoden.\*\*

\*\*Vergleich einer einfachen Kalendermethode mit der Wahrscheinlichkeit, einen Test an einem Tag mit LH-Anstieg durchzuführen (Ellis J., et al. Hum Repro (2011) 26: i76)

dass Sie planen können und mehr Gelegenheiten zum Schwanger werden haben.\*

\*In einer Studie mit 87 Frauen wurden in 80 % der Zyklen vier oder mehr fruchtbare Tage erkannt. Gemessen an tatsächlichen Zykluslängen (2012).

vorbereitet und wenn die Spermien in der dadurch geschaffenen „spermienfreundlichen“ Umgebung überleben können. Ein Anstieg des LH findet 24-36 Stunden vor dem Eisprung statt. Er löst letztlich aus, dass das befruchtungsfähige Ei freigesetzt wird.

Fruchtbarkeit erreicht haben (der Smiley wird konstant für 48 Stunden angezeigt) – so müssen Sie keine Linien interpretieren, um zu wissen, wann die beste Zeit für ein Baby ist.

## Anwendung

### Erster Schritt



Richten Sie den Pfeil auf dem Ovulationsteststäbchen auf den Pfeil auf der Testhalterung aus und führen Sie das Teststäbchen so weit ein, bis es hörbar einrastet. Warten Sie auf das „Test bereit“-Symbol und führen Sie sofort den Test durch.

### Zweiter Schritt



Halten Sie das Teststäbchen mit der saugfähigen Testspitze nach unten genau drei Sekunden lang in Ihren Urinstrahl oder tauchen Sie es 15 Sekunden in eine aufgefangene Urinprobe.

### Dritter Schritt



Innerhalb von einer Minute fängt das Symbol „Test bereit“ an zu blinken und zeigt so an, dass der Test läuft.

### Vierter Schritt



Nach fünf Minuten können Sie Ihr Ergebnis ablesen – niedrige, hohe oder maximale Fruchtbarkeit. Lesen Sie vor der Verwendung immer die vollständige Gebrauchsanleitung.